

## PRELEVEMENTS DE POILS AVEC BULBES



Pour ses analyses génomiques, IngenomiX extrait de l'ADN à partir de prélèvements pileux. L'étape de prélèvement est donc très importante.

- Les poils sont prélevés sur le toupillon de la queue de l'animal
- remplir 1 kit pour chaque animal à analyser

Avant tout prélèvement, assurez vous que les poils du toupillon de la queue de l'animal sont propres et secs ; au besoin, enlevez les saletés ou brossez la queue.



Pour réaliser le prélèvement :

- Choisissez une mèche de poils propres, préférentiellement à l'extrémité du toupet de la queue pour plus de facilité,
- Tenez-la fermement près de la peau ; il est possible de s'aider d'un stylo en faisant un tour mort autour de la mèche,
- Arrachez la touffe de poils en tirant d'un coup sec vers le haut de la queue,
- Assurez-vous que les **bulbes blancs** soient bien présents à l'extrémité des poils ; **60 à 70 bulbes minimum** sont nécessaires pour faire les analyses. Au besoin, prélevez une seconde touffe de poils.
- Placez les poils dans le sachet du kit ; il est possible de couper l'excédent de poils.



Une fois le prélèvement réalisé :

- remplir **soigneusement** l'étiquette de chaque kit de prélèvement en indiquant le numéro d'identifiant de l'animal, la date de prélèvement, ainsi que l'(es) analyse(s) demandée(s)
- Attention à ne pas mélanger les poils de plusieurs animaux dans le même kit, cela fausserait les résultats d'analyses.
- Mettre **tous les kits et le bon de commande** dans l'enveloppe pré-timbrée et les renvoyer à IngenomiX

INGENOMIX,  
Pôle de Lanaud  
87220 BOISSEUIL

----

Tel: 05 55 06 46 52  
contact@ingenomix.fr

----

www.ingenomix.fr

**Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous**